

# TOURNIQUET

## Procédure

 <p><b>1</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>› <b>ENCERCLER</b> le membre avec la bande en passant dans la boucle.</li><li>› <b>POSITIONNER</b> à 5 cm au-dessus du site de saignement, directement sur la peau.</li></ul>	 <p><b>2</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>› <b>SERRER</b> en tirant sur la bande jusqu'à ce qu'il soit impossible de passer 3 doigts.</li><li>› <b>FIXER</b> le velcro.</li></ul>	 <p><b>3</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>› <b>TOURNER</b> la tige jusqu'à ce que le saignement s'arrête.</li></ul>
 <p><b>4</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>› <b>BLOQUER</b> la tige à l'intérieur de l'attache.</li></ul>	 <p><b>5</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>› <b>VÉRIFIER</b> l'absence de saignement/pouls distal.</li><li>› <b>PLACER</b> un 2<sup>e</sup> tourniquet au besoin.</li></ul>	 <p><b>6</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>› <b>FIXER</b> avec la courroie TIME.</li><li>› <b>ENREGISTRER</b> l'heure d'application.</li></ul>

## Rangement

 <p><b>1</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>› <b>PASSER</b> la pointe dans la fente dans la boucle.</li><li>› <b>TIRER</b> 20 cm de bande à travers, repliez-le et collez la bande sur elle-même.</li></ul>	 <p><b>2</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>› <b>APLATIR</b> la boucle formée par la bande.</li><li>› <b>PLACER</b> la boucle dans le milieu de la bande aplatie.</li></ul>	 <p><b>3</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>› <b>PLIER-LE</b> en deux en plaçant la boucle à une extrémité.</li><li>› <b>ASSURER-VOUS</b> que la sangle TIME est ouverte et en position d'attente.</li></ul>
---	--	--

# TOURNIQUET

Vidéo  
démonstrative



## Indication

- › Hémorragie significative d'un membre incontrôlée par la pression

## Équipement



## Précautions

- › Si vous ne pouvez pas être sûr ou ne pouvez pas prendre le temps supplémentaire pour examiner d'où vient le saignement en fonction de la situation, le tourniquet peut être efficacement appliqué sur les vêtements aussi haut que possible sur le bras ou la jambe.
- › Le tourniquet ne doit PAS être appliqué sur des objets solides à l'intérieur des vêtements.
- › Dès que la situation le permet, le membre blessé doit être évalué et le tourniquet doit être repositionné à 5 cm au-dessus de la blessure directement sur la peau.

