



Milieu transport	Amies	UTM	LIM	TSB Salt	Cobas PCR Media	Aucun	Aucun
Utilisation	Analyses de Bactériologie	Analyses de Virologie	Dépistage de Streptocoque du groupe B chez les femmes enceintes	Dépistage de SARM / <i>Staphylococcus aureus</i>	Prélèvement cervical ou vaginal pour PCR <i>C. trachomatis</i> / <i>N. gonorrhoeae</i>	Prélèvement naso-pharyngé, conjonctival, salivaire ou urétral. À déposer dans milieu UTM (rose) ou Amies selon l'analyse demandée	Virologie seulement (prélèvement de gorge ou cutané), à déposer dans milieu UTM (rose)
GRM	50025909	50011636	50012284	50012753	50019521	50011779	5008011

- Tous ces écouvillons sont sécables et doivent donc être cassés puis laissés dans les tubes. Attention de ne pas toucher la partie inférieure au trait de cassure.
- Pour plus d'informations, référez-vous au répertoire des analyses du CHU Sainte-Justine au <https://www.chusj.org/fr/Labotest/Accueil/Analyses>

Préparé par: Fabien Rallu	Envoyé par: Émilie Vallières	Approuvé par: Christian Renaud	Date d'émission: 2018-02-07	Page 1 de 2
-------------------------------------	--	--	---------------------------------------	-----------------------

Nom du document : Écouvillons utilisés pour les analyses de microbiologie

Objectif : Résumer en un seul document les écouvillons et milieux de transport à utiliser pour les prélèvements de microbiologie.

Code ID du document : DOC-BACT-0132 **Version :** 01

Statut : Approuvé

Préparé/révisé par :

Fabien Rallu, PhD
Microbiologiste agréé

Sig :

Envoyé par :

Émilie Vallières
Microbiologiste-Infectiologue

Sig :

Approuvé par :

Christian Renaud
Chef Département Microbiologie

Sig :

Date d'entrée en vigueur : 2018-02-07

Date prévue de révision : 2020-02-07

Nombre de page : 2

Localisation du document et des copies :

Original : Secrétariat administratif 5901
Copie officielle : Bactériologie local 2919
Copie électronique : LBX Web > Bactériologie > Généralités >Prélèvements

Commentaires et mises en garde

Modifications

- Ce document a subi des modifications majeures
- Ce document a subi des modifications mineures :
p. _____ détail : _____
- Ce document a été mis en gabarit officiel sans subir d'autres modifications
- La personne soussignée a revu ce document et l'a reconduit sans modification :

Date	Signature autorisée

<i>Préparé par:</i> Fabien Rallu	<i>Envoyé par:</i> Émilie Vallières	<i>Approuvé par:</i> Christian Renaud	<i>Date d'émission:</i> 2018-02-07	<i>Page</i> 2 de 2
-------------------------------------	--	--	---------------------------------------	-----------------------